

DENU COMPOSITE RESIN

DENU kompozit tömőanyag, 4g, fecskendőben több színben

Fényre kötő, rezin alapú kompozit tömőanyag nanofillerrel. Vízben oldhatósága és biokompatibilitása nagyfokú polimerizációt, minimális zsugorodást és magas fokú keménységet biztosít. Minimálisan ragad és minimálisan folyékony, ennek köszönhetően kiválóan használható mind az elülső, mind a hátsó fogak helyreállításában.

Színek: A1, A2, A3, A3,5

Jellemzői:

- Hidrofil anyag optimális nanofillerrel.
- Nyomószilárdsága: 396 Mpa, hajlítási merevség: 175 Mpa, keménység: 95 Mpa.
- Kiválóan használható (nem ragad) és könnyen behelyezhető.
- Röntgenárnyékot ad.
- Minden fognál használható.
- A természetes fogszínhez közeli színeivel megfelel az esztétikai követelményeknek.

Alkalmazási javaslatok:

- metsző-, szem- és rágófogak helyreállítása
- törött metszőfogak helyreállítása
- amalgám helyettesítésére
- esztétikai helyreállítás
- csonkfelépítés

Kiszerezés:

1 x 4g-os fecskendő

Fényre kötő, rezin alapú kompozit tömőanyag nanofillerrel. Vízben oldhatósága és biokompatibilitása nagyfokú polimerizációt, minimális zsugorodást és magas fokú keménységet biztosít. Minimálisan ragad és minimálisan folyékony, ennek köszönhetően kiválóan használható mind az elülső, mind a hátsó fogak helyreállításában.

Felhasználás:

- Megfelelő színárnyalat kiválasztása
- Izolálás és szárítás

Figyelmeztetések:

- Ne használja olyan betegeknél, akiknek bőrén kiütés található, akik bőrgyulladástól szenvednek vagy különösen érzékeny a bőrük.
- Ne használja tovább a terméket, ha a kezelés közben a páciensnél allergiás reakciók jelentkeznek.
- Az anyag kizárólag szájjában használható. Kerülje a szembe jutást.
- Védőeszköz használata (kesztyű, maszk, szemüveg) ajánlott.

Tárolás

- Ne tegye ki közvetlen fénynek
- Használat után azonnal helyezze vissza a zárókupakot
- Hűvös, száraz helyen tartandó. (2-27°C)
- Kerülje a levegővel való érintkezést
- Minőségét szobahőmérsékleten 2 évig őrzi meg.