

JT-25 típusú forgatható gázégő

- Részei:**
1. Munkaláng készlet
 2. Gyújtóláng készlet
 3. Lángszabályozó gyűrű (L)
 4. Lángszabályozó gyűrű (S)
 5. Burkolat
 6. Hullámlemez
 7. Forgatható csavar
 8. 0 Gyűrű
 9. Alap
 10. Munkaláng szelep
 11. Hátlap
 12. Gumi támasz
 13. Hátsó szelep
 14. 0 Gyűrű
 15. Első szelep
 16. 0 Gyűrű
 17. Levegővezeték
 18. Gyújtóláng szelep
 19. Teljes szelep

Ez a legújabb, legjobb konfigurációval készült energiatakarékos gázégő.
A szabadalom hamarosan jóváhagyásra kerül.

Az alábbi specifikációkkal kerül forgalomba:

1. 30 fokban forgatható balra és jobbra is, így bal- és jobbkezesek is jól használhatják.

2. A gyújtóláng és a munkaláng csöve külön működik. Mindkettő saját ellenőrző rendszerrel rendelkezik. Ez teszi energiatakarékosá a gázégőt, illetve lehetőséget teremt az egy- és kétlángos alkalmazásra.
3. A kiváló ellenőrző rendszer biztosítja, hogy soha ne szivároгjon a gáz a gázégőből használat során.

Használati útmutató

1. Kapcsolja ki a 10-es, 18-as és 19-es szelepet, mielőtt a gázra csatlakoztatja a készüléket!
2. Csatlakoztassa a gázvezetékét a levegő vezetékhez, majd kapcsolja be a gázvezeték szelepeit! Miután meggyőződött arról, hogy nem szivároг a gáz, kapcsolja be a levegő vezeték szelepeit (19)! Gyújtsa meg a tüzet, kapcsolja be a munkaláng szelepét (10), majd állítsa be a lángot!
3. Erősebbre a 3-as gyűrűvel, gyengébbre pedig a 4-es gyűrűvel tudja a lángot.
4. Kikapcsolhatja a gyújtóláng szelepét, ha egylángos módban szeretné használni.
5. Ne felejtse el kikapcsolni az összes szelepet használat után!
6. Ez a gázégő alkalmas palackos és vezetékes gázhoz, széngázhoz és gázolajhoz egyaránt.